

# 科莱瑞迪 塑形垫（人体定位垫）

- ✓ 适形好
- ✓ 强度高
- ✓ 可重复塑形
- ✓ 环保卫生



# AccuCushions<sup>®</sup>

## 塑形垫 (人体定位垫)




### 产品优势




#### 使定位更加精确

使用塑形垫可以有效减少头颈部与底座及头枕间的空隙，并对头部（及肩部）形成包裹，从而提升固定精确度以及病人舒适度。

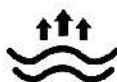


#### 让病人更加舒适

1. 加热软化后的塑形垫给肌肤以温暖柔软的触感，让病人感觉舒适和放松；
2. 塑形后充分服帖于人体，加之面料触感舒适，从而大大提升病人的舒适感。

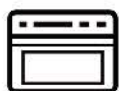

#### 推荐使用烤箱，操作更加便捷

建议使用烤箱，十分钟内完成加热，给模拟定位更加充裕的操作时间。恒温水箱同样适用，多样的加热方式供您选择。

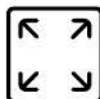

#### 更好的适配性

产品可在xy方向上进行拉伸，适配各种体型，满足各类患者的定位需求。



#### 可重复塑形

使用记忆性材料，加热后可对局部塑形进行调整。



#### 无毒无异味、安全无刺激

布料通过第三方安全性检测；无刺激性化学成分。

## 头部定位垫



操作视频

### RG550-H2

规格：头脚方向：40.5cm

肩膀方向：25.8cm



适合各种头部尺寸，充分贴合颈部

充分贴合患者头部曲线，可定位于各类头枕上；  
有效提高定位精度，助力肿瘤高精度放射治疗。



### RG550-S1

#### 长度增加，适用范围更广

可提供从脊柱到头部的长区域固定，或用于手臂和腕部及其它肢体末端的固定。

规格：头脚方向：45cm

肩膀方向：25cm



### RG550-CEL2

#### Elekta's Gamma Knife Icon System 专用

搭配ICON膜片使用以提供更精确的固定和更舒适的体验

规格：头脚方向：34cm

肩膀方向：17.5cm

厚度：2.5cm



# 头颈肩部定位垫



操作视频

## RG560-SH1

规格：头脚方向：50cm  
肩膀方向：52cm



有效减少头颈部与底座及头枕间的空隙，并对肩部形成有效包裹，限制肩部移动可配合定位膜与口咬器组成头颈肩部联合固定方案。



## RG560-SH3

**增大肩部固定面积，对肩部形成更好的包裹**

搭配绑带使用让操作更加便捷。更好地限制了患者在头脚方向上的位移。

规格：头脚方向：50cm  
肩膀方向：52cm



## RG560-SH5

**更大的固定面积，满足各类患者的定位需求**

为了达到更好的重复性精度，推荐联合头颈肩定位膜使用。

规格：头脚方向：60cm  
肩膀方向：48.5cm

## 体部定位垫



操作视频

适用于体腹部肿瘤放疗的固定，为体部提供大面积支撑及充分的包裹性。



### RG570-S

规格：头脚方向：60cm  
肩膀方向：50cm



### RG570-S1

规格：头脚方向：60cm  
肩膀方向：40cm

## 操作说明



- 01 初步定位**  
确定患者治疗体位，选取合适头枕，患者躺下确定头枕位置后起身；



- 02 烤箱加热**  
将塑形垫置于75°C烤箱中加热10分钟，取出，将塑形垫置于适配条上方，根据患者体型进行预拉伸，抚平边缘；



- 03 按压塑形**  
患者躺回到确定好的治疗位，用双手按压塑形垫使其充分服帖患者外周轮廓；  
(头颈肩需注意颈部区域需充分按压以提供有效支撑)；



- 04 绑带固定**  
将魔术贴粘贴于绑带上，使用绑带连接塑形垫两端；




- 05 等待冷却**  
等待约6分钟，待塑形垫初步冷却后，可移除绑带；



- 06 静置硬化**  
塑形垫静置15分钟后彻底硬化。



## 塑形垫专用头枕

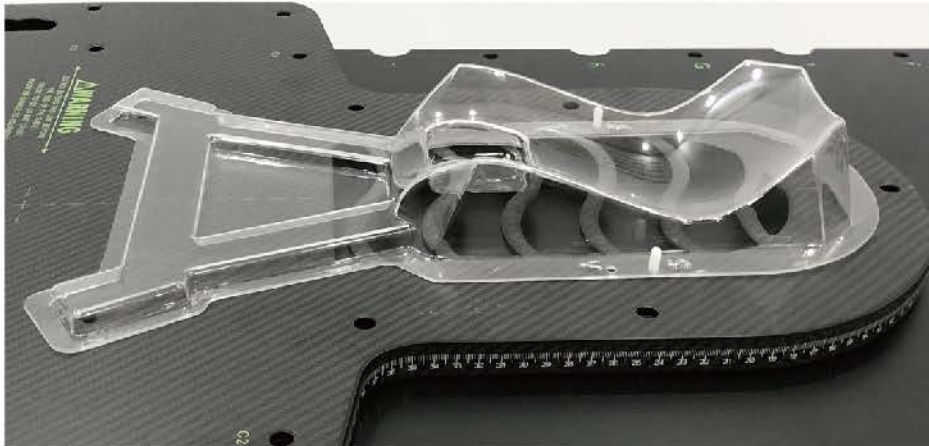

- 适配多种底座，只要有标准头枕插销即可使用；
- 降低高度，减少膜片拉伸程度

编码：R507-T

规格：宽276x424，高56mm

## 塑形垫性能说明

——俄亥俄州大学肿瘤中心

| No Headrest |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|
| Reading     | 6x    | 6FFF  | 15x   |
| 1           | 15.29 | 15.01 | 16.54 |
| 2           | 15.30 | 14.98 | 16.52 |
| 3           | 15.30 | 14.97 | 16.52 |
| Average     | 15.30 | 14.99 | 16.53 |

| New Headrest |       |       |       |
|--------------|-------|-------|-------|
| Reading      | 6x    | 6FFF  | 15x   |
| 1            | 15.07 | 14.71 | 16.35 |
| 2            | 15.07 | 14.69 | 16.35 |
| 3            | 15.06 | 14.69 | 16.35 |
| Average      | 15.07 | 14.70 | 16.35 |
| Transmission | 0.985 | 0.981 | 0.989 |

射线透过率超过98%



MR兼容，满足IMRT，IGRT，SBRT，Proton高精度放疗需求

# Klarity® 科莱瑞迪

## 造福人类健康 提高生活品质



### 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

广州市经济技术开发区沙湾三街14号一至六楼

电话: +86-(0) 20-8222 6380

传真: +86-(0) 20-8208 8552

邮箱: info@klarity-medical.com

网址: www.klarity-medical.com

版本号: KL-CY-20220803-A0



关注公众号  
科莱瑞迪放疗



扫一扫获取  
电子版彩页